

BoneProtect Fleece / BoneProtect Cone®

CZ – návod k použití



Kat. číslo	Velikost	Obsahuje
Fleece – 12	2 cm x 2 cm	12 kusů
Cone - 12		12 kusů

Výrobce:

MBP
Medical Biomaterial Products GmbH
Lederstrasse 7
19306 Neustadt-Glewe
Německo

Distributor:

Dentegris Deutschland GmbH
Grafbacher Strasse 136
47199 Duisburg
Německo
Tel.: +49 2841 88 271-0
Fax: +49 2841 88 271-20
www.dentegris.de

Rev. 03/2017-06

Poslední revize: 27.06.2017

Návod k použití BoneProtect Fleece / BoneProtect Cone

Vstřebatelný, sterilní lokální hemostat
Pro jednorázové použití

Prasečí kolagen vyrobený z vepřového koria.
100g obsahuje minimum 96,75g kolagenu prasečího původu.

Vzájemné působení s ostatními medikamenty

Nepoužívejte antiseptika uvolňující chlor (chloramin), stejně jako tanin a žíraviny, které modifikují proteiny, nesmí být použity v kombinaci s kolagenem
Masti, prášky a silikonové přípravky mohou modifikovat mezery mezi kolagenovými vlákny, rouny nebo houbami, takže by neměli být také použity.

Indikační oblasti

BoneProtect Fleece / BoneProtect Cone je indikován všude tam, kde musí být zastaveno kapilární, žilní, drobné tepenné a difúzní prosakující krvácení a kde jsou konvenční způsoby kontroly krvácení buď nedostatečné, nebo technicky obtížné a časově náročné.

Indikace

Maxilofaciální chirurgie

- Zachování lůžka
- Hemostyptické ošetření extrakčních ran pacientů s rizikem krvácení
- Sinus-lift
- Periimplantátové kostní defekty při okamžitě umístění implantátů
- Vyplnění expanzní mezery při štěpení kostí
- Vyplnění kostních defektů (např. po cystektomii)

Dávkování a použití

Po otevření obalu je BoneProtect Fleece / BoneProtect Cone vyjmut suchými sterilními nástroji, umístěn na vyčištěné ošetřované místo a lehce přitlačen tampony. BoneProtect Fleece / BoneProtect Cone lze stříhat na potřebnou velikost pomocí sterilních nůžek. Okamžitě po kontaktu s mokřým povrchem rány se BoneProtect Fleece / BoneProtect Cone přilepí na ránu a vytvoří gelovou vazbu s krví. U povrchových ran se doporučuje další vrstva bavlněné gázy fixované elastickými obvazy.

Kontraindikace

BoneProtect Fleece / BoneProtect Cone je kontraindikován u infikovaných ran a nesmí se používat současně s methylnmethakrylátovým lepidlem, nesmí se používat k intravazální aplikaci.

Pokud používáte vstřebatelný hemostatický prostředek na kostní nebo neurální prostory nebo v jejich blízkosti:

- použijte minimální množství nezbytné k dosažení hemostázy; a
- po dosažení hemostázy odstraňte co nejvíce přípravku. To sníží pravděpodobnost poškození nervové a jiné měkké tkáně otokem vstřebatelného hemostatického činidla a / nebo migrací a otok fragmentů činidla.

Vedlejší účinky

V ojedinělých případech se mohou objevit alergické reakce. Někdy se po aplikaci suchého přípravku na povrch rány objeví bolest. Nárůst stávající infekce je velmi vzácný.

Poznámka!

BoneProtect Fleece / BoneProtect Cone

- Je sterilizováno gamma zářením a nesmí být re-sterilizováno
- musí být považován za nesterilní a musí být zlikvidován, pokud je balení/obal poškozeno
- nesmí být používán po uplynutí expirace
- nesmí být skladován při teplotě nad 24°C
- musí být chráněn před vlhkostí
- je zdravotnickým prostředkem a musí být tedy chráněno před dětmi!

Vysvětlení symbolů



Sterilizováno zářením



Max. skladovací teplota



Datum expirace



Kód šarže



Katalogové číslo



Značka shody



Nepoužívejte opakovaně



Čtete návod k použití



Výrobce



Výrobce:

MBP
Medical Biomaterial Products GmbH
Lederstrasse 7
19306 Neustadt-Glewe
Německo

Distributor ČR:

BIOMED PRAHA, s.r.o.
Pod Pekařkou 107/1
147 00 Praha 4 - Podolí
Česká republika
Tel.: +42 731 464 759
www.biomed-praha.cz