

VAKUOVÝ POLŠTÁŘ GERMA NÁVOD K POUŽITÍ

Opatření

- Průběžně kontrolujte, zda vakuová pumpa pracuje správně a zda je možné z polštáře odsát vzduch.
- Při manipulaci s polštářem dávejte pozor na překážky, ostré hrany apod.
- Vyvarujte se manipulace s polštářem v blízkosti otevřeného ohně.
- Zkontrolujte, zda polštář není prasklý.
- Výrobek sami neupravujte - za případné úpravy odpovídá lékař.
- Polštářek DentaComfort podle MDR 2017/745 třídy 1 pro zdravotnické prostředky.

Introdukce

Vakuový polštář Germa je určen k použití jako nástroj pro polohování a fixaci, imobilizaci nebo stabilizaci pacientů v mnoha různých situacích. Aby bylo dosaženo požadovaného tvaru a tuhosti polštáře, je nutné jej vytvarovat a postupně vytvořit v polštáři podtlak odsátím vzduchu. To lze provést pomocí vakuové pumpy Germa nebo jiného odsávacího zařízení. Polštář se skládá z vnějšího pláště ze vzduchotěsného materiálu a z vnitřního textilního potahu, polystyrenových granulí a ventilu.

Bezpečnostní opatření a kontrola

Průběžně kontrolujte, zda vakuová pumpa funguje správně a zda je možné z polštáře odsát vzduch. Vyvarujte se manipulace s polštářem v blízkosti ostrých a hranatých předmětů a otevřeného ohně. Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození, prasklinám nebo opotřebením.

Specifikace

Vakuový polštář Germa je testován na nehořlavost podle normy EN 1021-1. Vnější materiálem je PVC fólie nebo tkanina potažená PVC. Vnitřní potah je vyroben z polyamidu a obsahuje polystyrenové granule. Vakuové polštáře jsou k dispozici ve velikostech 80 x 100 cm, 80 x 200 cm, 55 x 30 cm, 55 x 65 cm, 55 x 85 cm a 40 x 50 cm nebo ve speciálních rozměrech.

Doporučená teplota použití 20 °C + 40 °C.

Skladování

Doporučená teplota skladování -20° C - +70°.

Při použití

Otevřete ventil a položte polštář na rovný povrch. Po dosažení rovnoměrného rozložení granulí, vytvarujte a složte polštář do výchozí polohy.

Vakuový polštář položte do požadované polohy pod pacienta. Pro polštáře s t-ventilem: otevřete ventil, vypusťte vzduch a zavřete ventil.

U šroubovacího ventilu: vložte do polštáře šroubovací ventil, zavřete ventil, dokud není zcela uzavřen – proti směru hodinových ručiček.

Pokud nejste spokojeni s podporou a stabilizací pacienta. Stačí ventil otevřít, přesunout polštář do požadované polohy, zavřít ventil a znovu odsát.

Čištění a dezinfekce

Po použití může být nutné polštář opláchnout mýdlem a vodou. Před uložením nechte polštář úplně vyschnout. V případě potřeby dezinfikujte. Otřete celou podložku roztokem obsahujícím 70% alkohol nebo použijte jiné běžné dezinfekční prostředky.

Údržba a opravy

Pravidelně kontrolujte funkčnost a vzduchotěsnost polštáře a pumpy. Případné netěsnosti lze zjistit vizuální kontrolou nebo opatrným napuštěním polštáře vzduchem, natřením celého povrchu a svárů mýdlovou vodou a následnou kontrolou polštáře na přítomnost vzduchových bublin.

Netěsnosti opravte následujícím způsobem:

Vyčistěte poškozené místo a nechte vyschnout. Vezměte vhodnou opravnou záplatu, přiložte ji a naneste lepidlo na netěsné místo. Počkejte asi 5 minut a umístěte opravnou záplatu na netěsnost. Přiložte záplatu a pečlivě ji přilepte po celé ploše tak, aby byla pevně na svém místě a nevznikaly v ní již žádné vzduchové bubliny. Opravené místo získá plnou pevnost po 24 hodinách.

Test

Chcete-li polštář otestovat, vypusťte vzduch a zajistěte stabilitu výrobku. Nechte jej vyprázdněný po dobu dvou hodin. Pokud má polštář stejnou výšku jako na začátku, lze jej označit za těsný. Vyzkoušejte pumpu přiložením špičky prstu k otvoru trubice a následným pumpováním; funkční pumpa vytváří silný podtlak, který je cítit na špičce prstu.

Skladování

Polštář skladujte při pokojové teplotě a na suchém místě.

Vyřazení výrobku

Polštáře Denta Comfort lze likvidovat společně s běžným domovním odpadem podle pokynů místních úřadů. Recyklační doporučení pro plasty podle jejich aktivní doby trvání. Materiály použité v obalu jsou šetrné k životnímu prostředí a lze je recyklovat.



Manufacturer:

AB Germa
Industrigatan 54-56
SE-291 36 Kristianstad
Sweden

Tel: +46 (0)44 12 30 30
Fax: +46 (0)44 10 31 79

E-mail: info@germa.se
www.germaprotec.com



Distributor:

BIOMED-PRAHA, s.r.o.
Pod Pekařkou 107/1
147 00 Praha 4 - Podolí
Tel.: +420 731 464 759
E-mail: info@biomed-praha.cz
www.biomed-praha.cz

Revize č. 4 ze dne 10.4.2021

UDI no	Art no	Article
07350019594179	22218100000	Positioning Pillow 80X100cm White GermaForm
07350019594186	22218140000	Positioning Pillow 80X100cm Blue GermaForm
07350019594193	22218200000	Positioning Pillow 80X200cm White GermaForm
07350019594209	22218240000	Positioning Pillow 80X200cm Blue GermaForm
07350019594216	22218300000	Positioning Pillow 55X30cm White GermaForm
07350019594223	22218340000	Positioning Pillow 55X30cm Blue GermaForm
07350019594230	22218400000	Positioning Pillow 55X65cm White GermaForm
07350019594247	22218440000	Positioning Pillow 55X65cm Blue GermaForm
07350019594254	22218500000	Positioning Pillow 55X85cm White GermaForm
07350019594261	22218540000	Positioning Pillow 55X85cm Blue GermaForm
07350019594278	22218600000	Positioning Pillow 40X50cm White GermaForm
07350019594285	22218640000	Positioning Pillow 40X50cm Blue GermaForm
07350019594292	22219040001	Positioning Pillow Wheelchair S
07350019594308	22219040002	Positioning Pillow Wheelchair M
07350019594315	22219040003	Positioning Pillow Wheelchair L
07350019594322	22219040004	Positioning Pillow Wheelchair XL
07350019596753	22220800000	Positioning Pillow Rescue 55X65 Cm
07350019596760	22221600000	Positioning Pillow Rescue 55X85 Cm
07350019594339	22393200000	Positioning Pillow DentaComfort White
07350019594346	22393200010	Positioning Pillow Female Surgery 80x100cm Green
07350019594353	22393200011	Positioning Pillow Female Surgery 80x100cm White
07350019594391	22393240000	Positioning Pillow DentaComfort Blue
07350019594407	22393300000	Positioning Pillow 55X30cm White
07350019594414	22393340000	Positioning Pillow 55X30cm Blue
07350019594421	22394100000	Positioning Pillow 55X65cm White
07350019594438	22394140000	Positioning Pillow 55X65cm Blue
07350019594445	22395800000	Positioning Pillow 55X85cm White
07350019594452	22395840000	Positioning Pillow 55X85cm Blue
07350019594469	22396000007	Positioning Pillow 20X40cm White
07350019594476	22396600000	Positioning Pillow 40X50cm White
07350019594490	22396640000	Positioning Pillow 40X50cm Blue
07350019594506	22396800001	Positioning Pillow 40X30cm White
07350019594520	22396840001	Positioning Pillow 40X30cm Blue
07350019594537	22390090100	Positioning Pillow 90X100cm White with back lock valve
07350019594544	22390100110	Positioning Pillow 100X110cm White
07350019594551	22391080105	Positioning Pillow 80X105cm White
07350019594575	22391090105	Positioning Pillow 90X105cm White
07350019594582	22391100000	Positioning Pillow 80X100cm White
07350019594599	22391140000	Positioning Pillow 80X100cm Blue
07350019594629	22392200000	Positioning Pillow 80X200cm White
07350019594636	22392240000	Positioning Pillow 80X200cm Blue
07350019594643	22392700004	Positioning Pillow 120X120cm White